



BIOCERÂMICO OBTURADOR
CIMMO®
Pronto para uso / Read to use / Preparado para usar



INTRODUÇÃO:

CIMMO® nRoot SP é usado para vedação e preenchimento de canais radiculares. Para pacientes com pulpite e doença periapical, apenas os dentes permanentes são apropriados. A pasta forma uma estrutura de rede espacial tridimensional; O sistema de pó permanece fora do espaço cibernético tridimensional e é capaz de permanecer estável no armazenamento. Quando o canal radicular é preenchido, a pasta destrói a rede espacial tridimensional através da troca com fluidos no canal radicular e libera a água nele, de modo que haja umidade suficiente no canal radicular para permitir que a pasta se solidifique de forma estável.

APRESENTAÇÕES:

- CIMMO® nRoot SP-0,5: 01 seringa com pasta (0,5g) e 05 ponteiros descartáveis;
- CIMMO® nRoot SP-1: 01 seringa com pasta (1,0g) e 10 ponteiros descartáveis;
- CIMMO® nRoot SP-2: 01 seringa com pasta (2,0g) e 20 ponteiros descartáveis;
- CIMMO® nRoot SP-2/4: 04 seringas com pasta (0,5g) e 20 ponteiros descartáveis;
- CIMMO® nRoot SP-3: 01 seringa com pasta (3,0g) e 30 ponteiros descartáveis;
- CIMMO® nRoot SP-5: 01 seringa com pasta (5,0g) e 50 ponteiros descartáveis.

COMPOSIÇÃO:

O produto consiste em Zircônia, Silicato Tricálcico e Silicato Dicálcico, Hidróxido de cálcio e espessante.

INDICAÇÕES:

Adequado para pulpite e doença periapical. **CIMMO® nRoot SP** é um material de preenchimento de vedação do canal radicular odontológico que pode ser usado para o tratamento de pulpite irreparável, necrose pulpar, periodontite apical, tratamento de reparação da polpa e falhas no interior do canal radicular. O benefício clínico associado foi definido como imediato e pode ser aplicado a todos os dentes permanentes. A remoção do material do canal radicular em conjunto com a guta percha, quando necessário, poderá ser realizado por métodos convencionais.

CONTRAINDICAÇÕES:

É contraindicado em pacientes alérgicos aos ingredientes deste produto. Em caso de reação alérgica, pode ser necessário retirar o material e realizar um novo tratamento do canal radicular, bem como um tratamento antialérgico.

PROPRIEDADES:

1. Liquidez, O diâmetro de cada amostra não é inferior a 20 mm;
2. Tempo de presa não superior a 72 h;
3. Impermeabilidade aos raios X, não deve ser inferior ou equivalente de uma chapa de alumínio de 3 mm de espessura.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Preparação adequada do canal radicular e irrigação do canal radicular de acordo com procedimentos endodônticos antes da aplicação do **CIMMO® nRoot SP**;
2. Retire a tampa da seringa, coloque firmemente a ponta descartável e injete o material na ponta para eliminar o ar;
3. Coloque a ponta descartável tão profundamente quanto possível no canal radicular e empurre o **CIMMO® nRoot SP** suavemente e continuamente para o ápice. Retire lentamente a agulha enquanto preenche o canal com a pasta. Preencha completamente o canal radicular para evitar a formação de bolhas de ar e evitar o enchimento excessivo do canal radicular; Coloque o cone de guta percha selecionado;
4. Inspeção radiográfica para determinar o enchimento com o material. Se a quantidade de preenchimento for insuficiente, enxágue completamente o **CIMMO® nRoot SP** e repita o procedimento de colocação;
5. Remova o dispositivo descartável (ponta descartável) da seringa girando no sentido anti-horário, volte a fechar a tampa da seringa com firmeza e armazene em um local seco a temperatura ambiente.

Nota: O dispositivo deve ser usado com pontas de guta-percha no interior dos canais radiculares.

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES:

- O dispositivo (ponta descartável) é apenas para uso único, não reutilize;
- Proibido reprocessar;
- O produto deve ser armazenado em um local seco a temperatura ambiente e a tampa protetora deve ser bem fechada após cada utilização para minimizar a exposição direta ao ar;
- É importante verificar a data de validade do produto antes do uso, caso contrário, pode afetar a operação ou causar outros transtornos ao cliente;
- Certifique-se de que a embalagem primária do produto não tenha sido aberta ou danificada antes da utilização;
- Leia cuidadosamente as instruções e utilize o produto corretamente, caso contrário, pode causar transtornos ao usuário ou ao paciente;
- Verifique o dispositivo (ponta descartável) antes da utilização e substitua a ponta se estiver entupida durante o enchimento;
- Evite o contato com a pele, membranas mucosas e olhos. Em caso de contato, lavar com água o mais rapidamente possível;
- Não use força excessiva na aplicação do material;
- Descartar após o uso de acordo com a regulamentação local;
- Se você tiver algum problema durante o uso, entre em contato com a MJS. Comunicar quaisquer acontecimentos graves relacionados com o dispositivo ao fabricante;
- Embalagem não estéril.

VALIDADE:







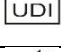




Período de validade: 2 anos

Prazo de validade após a abertura: 1 ano

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

CIMMO® nRoot SP deve ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, protegido da luz e longe de umidade.

SIMBOLOGIA:

	Fabricante		Data de fabricação		Vencimento
	Lote		Consultar as instruções de utilização		Atenção
	Identificação única de dispositivo		Proibido reprocessar		Não estéril
	Manter seco		Manter afastado da luz solar		

FABRICANTE:

Enpuno Biotechnology Co., Ltd

No. 201, Haiping Park Production Plant3, No.229, Guyuan Road

Changsha High&tech Development Zone, Changsha City, Hunan Province, China

Tel: +86-731-84257959

Website: www.enpbiotech.com

Made in China

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MJS Indústria e Comércio de Materiais para Saúde Ltda (CIMMO)

CNPJ: 24.752.361/0001-52

Avenida Domingos Faria Machado - 180 - Lot. Paraty

CEP: 37561-112 - Pouso Alegre - Minas Gerais – Brasil

Atendimento ao Consumidor: (Brasil)/ sac@cimmo.com.br

Responsável técnico: Sérgio Ribeiro da Silva – CRO/MG – 18330

Notificação ANVISA N°: 81518249007

